

ESTETICA**PRO**

Manual de instrucciones

Micromotor Camo



DEFINICIÓN DEL ARTÍCULO:

Micromotor eléctrico para uso en sectores Dental, Joyería, Podología, Estética y Audiología.

DESCRIPCIÓN:

1. Control de velocidad manual
2. Caja de control
3. Interruptor selector de sentido de giro (derecha/izquierda)
4. Interruptor selector de cambio de voltaje (110-220 voltios).
5. Interruptor de general marcha/paro.
6. Cable de entrada.
7. Interruptor selector manual/pedal.
8. Conector de pedal.
9. Porta fusible.
10. Indicador de marcha.
11. Pedal marcha/paro.
12. Conector de motor.
13. Pieza de mano (motor).
14. Soporte pieza de mano.

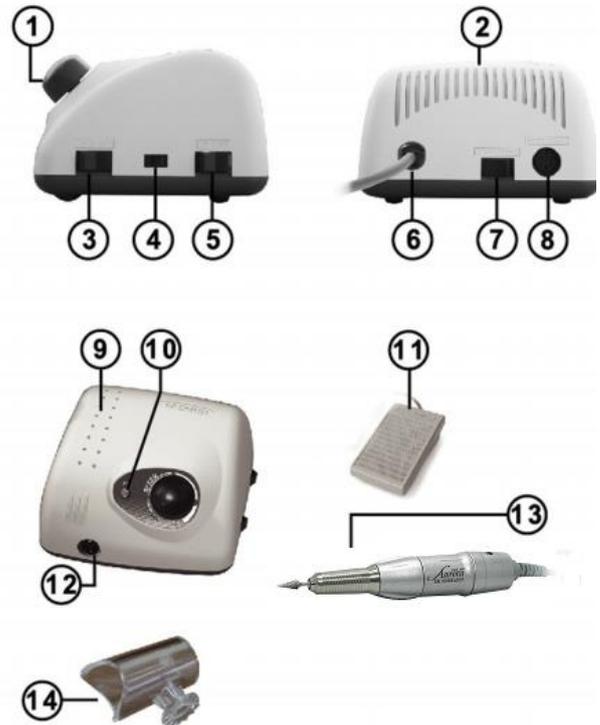


Fig. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Micromotor de 0 a 35000 RPM. y 50W. de potencia.

Tensión: AC240V 50/60Hz.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

- Nunca ponga en marcha el micromotor con la pinza abierta
- Observe siempre el grado de velocidad máxima recomendado por el fabricante al usar cualquier accesorio (Fig. 2).
- Utilice solamente los accesorios clasificados para 30000 RPM. o velocidades inferiores.
- Nunca utilice accesorios que parezcan estar dañados, flojos o con vibración.
- No atasque el motor atorando o usando una presión excesiva en los accesorios. Podría dañar el motor.
- No cubra las ranuras de ventilación del motor.
- Nunca utilice el micromotor con la pieza de mano en posición abierta. Utilícelo y almacénelo siempre con una fresa o accesorio en la pinza y con la pinza en posición cerrada.
- Nunca utilice el micromotor en presencia de líquido inflamable o gas.
- No ponga en contacto el micromotor con agua u otros líquidos ni lo utilice con las manos mojadas.
- No está previsto que esta unidad sea utilizada por menores o personal no profesional.

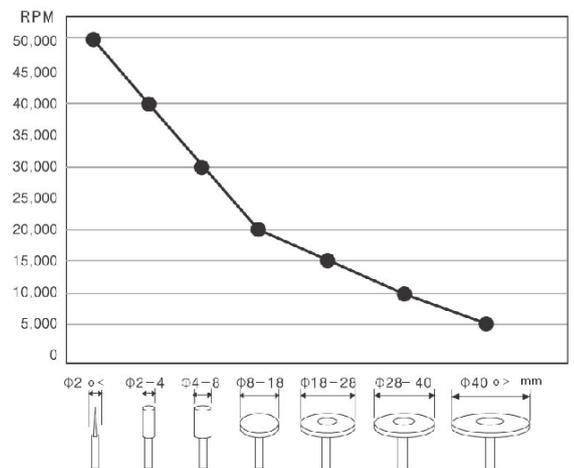


Fig. 2

INTRUCCIONES DE USO:

- Antes de usar el micromotor asegúrese de que el interruptor de marcha/paro (5) está en posición "off".
- Conecte la pieza de mano (13) a la caja de control (2)
- Posicione el control de velocidad manual a "0".
- Conecte el cable de entrada a la red.
- Coloque la fresa en la pieza de mano mediante la rotación de ésta ¼ de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj. Cierre la pinza mediante la operación contraria.
- Asegúrese de que la fresa está correctamente fijada.
- Seleccione el sentido de rotación mediante el interruptor (3).
- Accione el micromotor mediante el interruptor general (5).
- Utilice el control de velocidad manual para seleccionar una determinada velocidad de rotación.
- MUY IMPORTANTE: para cambiar el sentido de rotación asegúrese de que el interruptor general está en posición "off".
- MUY IMPORTANTE: para cambiar de fresa asegúrese de que el interruptor general está en posición "off"
- Para utilizar el pedal de marcha paro, conéctelo en el conector de pedal (8) con el interruptor general en "off". Al activar el interruptor general el pedal actuará como interruptor.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

- Evite en lo posible que el polvo y otros residuos penetren en la pieza de mano.
- Utilice un paño ligeramente humedecido para limpiar el aparato.
- La pieza de mano no necesita ningún lubricante para su mantenimiento.

GARANTÍA:

La garantía del micromotor CAMO es de un año.

La garantía cubre defectos en materiales y fabricación.

La garantía no cubre daños durante el transporte, accidentes o desgaste normal de componentes escobillas y cojinetes.

El fabricante no se hace responsable de posibles daños o perjuicios por la mala utilización del micromotor.

Condiciones de transporte y almacenamiento:

- Temperatura: 10 – 40°C
- Humedad: 30 – 75% RH
- Presión: 700 -1060HPa



SAESHIN



SAESHIN PRECISION CO.,LTD.
HEAD OFFICE & FACTORY
93-15,PAHO-DONG
DALSEO GU,KOREA
Tel. 82-53-587-2340 / 2341
Fax. 82-53-587-2347

ESTETICA**PRO**